

BLIMO CABINSKOOTTERI KÄYTTÖOPAS



BLIMO
APUVÄLINEET

SISÄLLYSLUETTELO

Laitteen yleiskuva.....	1
Ennen käyttöönottoa.....	2
Vapaatila.....	3
Akku ja laturi.....	4
Miten käytät Blimoasi.....	5
Säädöt.....	6-7
Ylläpito.....	8-9
Vianetsintä.....	10
Yhteystiedot.....	11

LAITTEEN YLEISKUVA



HUOM: Tämän käyttöoppaan jotkin yksityiskohdat, kuten kuvat saattavat erota todellisesta tuotteesta. Kuvat on tarkoitettu havainnoiviksi.

ENNEN KÄYTTÖNOTTOA

Kun Blimo skootterisi toimitetaan sinulle, se on lähes kokonaan koottu. Pakkaus, jossa laite toimitetaan, voidaan taittaa kokoon ja se kannattaa säästää tulevaisuuden varalle, jos sinun täytyy joskus lähettää laite jonnekin. Pakkaus on myös hyvä suoja pidempiaikaisen säilytyksen ajan.

AKKUJEN KIINNITTÄMINEN

Joidenkien mallien akut tulevat valmiiksi laitteeseen kiinnitettynä, mutta on silti tärkeää tarkistaa, että ne on kiinnitetty kunnolla ennen, kuin käytät Blimoa.

Aloita nostamalla istuin pois, jos se on kiinnitettynä. Tämän jälkeen voit poistaa kuoren, joka on akkujen päällä. Useimmissa malleissa tämä kuori on kiinni vain tarranauhalla. Aloita vetämään kuorta istuimen takaa. Joissakin vuosimalleissa kuori on kiinnitetty yhdellä ruuvilla, jonka saa avattua käsin. Ruuvi on hyvin näkyvä keskellä kuorta.

1) Aseta molemmat akut akkukuoren alle.

2) Liitä akkujohdot vastaaviin akkujen napoihin ohjeiden mukaisesti.

- 1) Ruuvi
- 2) Jousiprikka
- 3) Tasaprikka
- 4) Johtokontakti
- 5) Akkunapa


Musta johto: MIINUSNAPA (akun napa on musta tai sininen)

Punainen johto: PLUSNAPA (akun napa on punainen)

3) Varmista patterit paikoilleen tarranauhan avulla.

4) Kun kaikki liitäntäosat on kiinnitetty oikeassa järjestyksessä, kiristä ruuvit jakoavaimella. pitää liitännät sitten akkujohdosta löytyvällä kumisuojuksella.

Kun akut on kiinnitetty, ne tarvitsevat kunnollisen ensimmäisen latauksen, suositellusti noin 12 tuntia. Ensimmäisen latauksen jälkeen akut olisi hyvä ladata jokaisen käyttökerran jälkeen.

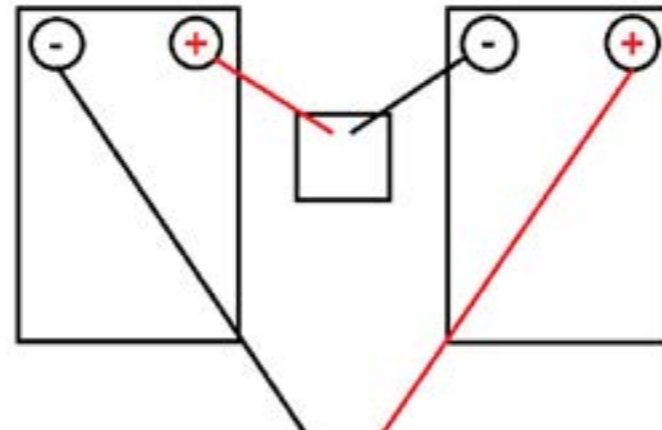

AKKUJEN KIINNITYSOSAT



VAPAATILA

Jos Blimoasi tarvitsee työntää, se on hyvä tehdä niin, että moottori ei ole käytössä, eli laite kannattaa asettaa neutraalille. Tämä toiminto on kätevä, jos sinun tarvitsee työntää Blimo esimerkiksi peräkärryyn tai varastokoppiin tai jos laitteen akku loppuu kesken ostosreissun. Näissä tilanteissa on hyvä, että moottorijarru ei ole päällä.

Vapaatilan saa kytkettyä päälle ja pois mustalla kumipäällysteisellä vivulla Blimon taka-akselissa. Vipu on sijoitettu hieman laitteen alle, **oikean** takarenkään taakse, ja se on väriltään musta. Kun haluat asettaa blimon ajotoiminnon päälle, työnnä vipu alas. Kun taas haluat vapaatilan käyttöön, vedä vipu ylös. Jos käynnistät skootterin virran vapaatilan ollessa päällä, kuulet merkkiään.

HUOM! Myös ohjaustangossa on nappi vapaatilalle, katso sivu 5. Paina tätä nappia pohjassa pitääksesi neutraalin tilan päällä. Tämä toimii ainoastaan, kun Blimon virta on kytketty päälle.

Älä hinaa laitetta 10 km/h nopeampaa.



Vapaatilavipu

AKUT JA LATURI

Blimo skootterisi on varustettu kahdella sarjaan kytketyllä 12V lyijyakulla. Akut ovat täysin sinetöidyt, eivätkä täten kaipaa ylläpitoa (niitä ei siis tarvitse täyttää akkunesteellä). Akut alkavat kulua käytössä ensimmäisestä käyttökerrasta, ja akkukantama pienenee ajan myötä. Normaali akkujen "elinikä" on 6 kuukaudesta 3-4 vuoteen, riippuen miten niitä käytetään ja käsitellään. Normaalisti akku vaihdetaan uuteen ennen sen loppuun kulumista, akkukantaman pienenemisen vuoksi.

Pidäthän myös mielessä, että akkukantama pienenee myös lämpötilan laskiessa. Jos akkujen lämpötila laskee esim. 20°C asteesta 5°C asteeseen, akkukantama saattaa lähes puolittua. Emme suosittele laitteen käyttöä alle -5°C asteen lämpötilassa.

Kun on aika vaihtaa akut, on hyvin tärkeää, että uudet akut ovat oikeanlaiset. Ota yhteyttä Blimo asiakastukeen, jotta saat oikeat akut!

On myös tärkeää, että akkuja käsitellään ja käytetään oikein, jotta epänormaalilta kulumiselta tai vahingoilta vältytään.

Jos et aio käyttää Blimo skootteriasi pidempään aikaan, akkuja tulisi ladata noin 30 päivän välein. Talvisäilytyksen ajan akkuja tulisi säilyttää pluslämpötilassa.

AKKUJEN TURVALLISUUSOPAS

1. Lataa akkuja vähintään 12 tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa.
2. Älä ikinä lataa akkuja 24 tuntia pidempään kerralla.
3. Älä ikinä lataa akkuja, jos akut ovat päässeet täysin tyhjiksi, ne saattavat olla vahingoittuneet tai rikki.
4. Lataa laite aina, ennen, kuin akkuvaraus laskee alle 20%.
5. Lataa akut jokaisen käyttökerran jälkeen.
6. Älä säilytä akkuja pakkasasteissa ilman, että ne on ladattu täyteen.
7. Älä koskaan anna akkujen ylikuumenemistä, älä siis säilytä akkuja esimerkiksi suorassa auringonvalossa.
8. Yläpidä akkuja pidempiaikaisen säilytyksen aikana lataamalla ne säännöllisesti täyteen.

LATURI JA LATAUS

Blimo skootterisi laturi lataa akut normaalisti, ja kun akut ovat täynnä, vaihtaa se lataustoiminnon ylläpitolataukseksi pitäen akut täynnä. Emme kuitenkaan suosittele pitämään laturia kiinnitettynä laitteeseen 24 tuntia pidempään kerralla. Laite tulee aina olla kytkettynä pois päältä latauksen ajan. Pidä huoli, että lataus tapahtuu kuivassa ympäristössä pluslämpötilassa. Laturi saattaa vahingoittua altistuaan kosteudelle!

Akkujen lataaminen:

- 1) Kiinnitä laturi seinäpistokkeeseen.
- 2) Kiinnitä laturin latauspää Blimo skootterisi latausliittimeen (katso yleiskuva).
- 3) Käynnistä lataus laturin virtakytkimestä.

Laturissa on kaksi diodia, jotka näyttävät latauksen statuksen. Kun lataus on käynnissä yksi diodi palaa PUNAISENA, ja toinen ORANSSINA. Kun akut ovat latautuneet täyteen, oranssi diodi muuttuu VIHREÄKSI. Jos tämä diodi vaihtaa väriä ORANSSIN ja VIHREÄN välillä, on laturi kytkettyyn ylläpitolataukseen. Akut ovat tässäkin tilanteessa täynnä.

Diodien vieressä on sulakekotelo, joka on merkitty nimellä "FUSE". Jos laturi lopettaa toimintansa, kannattaa kokeilla vaihtaa sulake. Laitteen mukana tulee pari ylimääräistä sulaketta.

MITEN KÄYTÄT BLIMOASI

Aloita tutustumalla ohjauspaneeliin ja kontrollereihin Blimosi ohjaustangolla. Alta näet listauksen paneelin toiminnoista.

- | | |
|---|--|
| 1. Töötti | 9. Akun varausindikaattori |
| 2. Vapaatilanappi | 10. Indikaattorivalo oikealle vilkulle |
| 3. Potentiometri/nopeusvalitsin | 11. Ajovaloilmaisin |
| 4. Vikailmaisain | 12. Nopeustasoilmaisin |
| 5. Tilailmaisain | 13. Nopeusvaihevalitsin |
| 6. Indikaattorivalo vasemmalle vilkulle | 14. Etuvalokatkaisin |
| 7. Nopeusmittari | 15. Vilkut oikea ja vasen |
| 8. Hätävilkut | |



AJAMINEN/PYSÄYTYS

Ohjaustangossa on edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi kaksi vipua, yksi vihreä ja yksi punainen. Eteenpäin ajaaksesi paina vihreää vipua. Kaasu on portaaton, joten mitä enemmän painat vipua, sitä nopeampaa laite kulkee. Peruuttaaksesi paina punaista vipua. Jos haluat pienentää laitteen huippunopeutta, käännä nopeusvaihe (13) hitaalle, tai valitse nopeus potentiometrillä (3). Kun huippunopeutta hidastetaan, myös laitteen kiihtyvyys hidastuu. Hitaampaa huippunopeutta kannattaa käyttää, kun skootterilla ajoon totuttelee, ja se on hyvä myös ahtaissa tiloissa, kuten sisätiloissa ajaessa..

Blimo skootterit on varustettu ns. magneettijarrulla, joka aktivoituu automaattisesti, kun kaasukahva vapautetaan.

HUOM: Vältä kaasun vapauttamista nopeasti, sillä laite pysähtyy todella nopeasti. On paljon mukavempaa vähentää nopeutta vähitellen!

LIIKENNELAKI

Blimo skootteri luetaan liikennelain ja sääntöjen mukaan polkupyörää vastaavaksi laitteeksi. Voit siis ajaa Blimoasi missä tahansa, missä polkupyörällä ajo on sallittu. Blimolla voit kuitenkin myös ajaa vain jalankulkijoille tarkoitetuilla teillä. Pidäthän jalankulkuväylillä nopeuden kuitenkin kävelyvauhdissa (noin. 5-6 km/h). Liikenteessä skootteria tulee käyttää tien oikealla puolella ja hämärässä ja pimeällä ajovalojen tulee olla päällä.

SÄÄDÖT

OHJAUSTANGON SÄÄTÖ

Ohjaustankoa voi säätää useaan eri ajoasentoon sekä kaadettua kokonaan kumoon. Säätääksesi ohjaustankoa, käännä lukituskahvaa alas päin samalla liikuttaen ohjaustankoa itseäsi kohti tai istestäsi pois päin. Kun ohjaustanko on pois kiinteästä asennostaan, liikuta ohjaustanko haluamaasi asentoon. Kliksahdus kertoo, kun ohjaustanko löytää uuden kiinteän asennon. Pidä huoli, että ohjaustanko kliksahtaa kiinteään asentoon ja pysyy siinä ennen liikkeelle lähtöä.

TUULETIN

Jos ilma on kylmä, voit helposti säätää Blimosi sisätilan lämpöä tuulettimen avulla. Löydät tuulettimen säätimen kontrollipaneelin oikealta puolelta.

ETÄLUKITSIN

Skootterisi mukana tulee kaksi avainta, joissa on etälukitsin. Kuten autossa, voit lukita Blimosi olematta skotterin välittömässä läheisyydessä. Avaimissa on myös kaksi muuta avainta, joissa ei ole toimintoa. Voit siis käyttää vain etälukitusominaisuutta!

ISTUIMEN SÄÄTÖ

Istuimen kiinnittämiseen ei tarvita työkaluja. Sinun ei myöskään tarvitse käyttää työkaluja istuimen irrottamiseen.

- 1) Rasvaa istuinputki öljyllä - esim. kuulalaakeriöljyllä. Tämä helpottaa satulan irrottamista jatkossa esim. autossa kuljettamisen helpottamiseksi.
- 2) Liu-uta istuinpaikoilleen siten, että istuintolppa päätyy istuinkiinnikkeeseen.
- 3) Vedä ja pidä satulatolpan hopean väristä vipua.
- 4) Käännä ja heiluta istuinta, jotta istuintolppa menee kiinnikkeeseen pohjaan asti. Kliksahdus kertoo, kun istuin kiinnittyy paikoilleen.

Huomioi, että voit säätää myös istuimen korkeutta kolmeen eri asentoon istuintolpan läpi menevällä pultilla.



SÄÄDÖT

SIVUPEILIT JA PERUUTUSKAMERA

Blimo Cabinskootterissasi on kaksi sivupeiliä, jotka sinun tulee asentaa itse mukana tulevilla rruveilla, 2 ruuvia per peili. Suosittelemme asentamaan sivupeilit ennen skootterin käyttöönottoa, jotta ympäristön tarkkailu ajon aikana onnistuu paremmin.

Skootterin hytin katosta löydät myös taustapeilin kameraominaisuudella. Takakameran kuvaa näkyy vain peruutettaessa, muulloin taustapeili toimii normaalisti peilinä.

Kameran lisäksi näet peruutuslinjat sekä varoitussignaalit, jotka ohjaavat sinua, kunm peruutat Blimollasi.



TUULILASIN PESUNESTE JA PYYHKIJÄ

Blimossasi on myös muita mukavuuksia, kuten pispapoika sekä tuulilasinyyhkijä. Löydät tuulilasin pesun nappulat kontrollipaneelilta. Auton tavoin tuulilasinpyyhkijällä on kaksi nopeusasetusta. Jos pyyhkijän sulat kuluvat ajan myötä, sen voi vaihtaa, aivan kuten autossa.

Cabinskootterin vanhemmissa malleissa tuulilasin pesunestettä lisätään pienen etusäleikön takaa ja uudemmissa malleissa tämä tapahtuu hytin sisäpuolelta. Suosittelemme käyttämään tuulilasinpesunestettä lisättäessä apuna suppiloa.

Voit myös säännöstellä tuulilasinpesunestettä. Aivan kuten autossa, neste ruiskuaa pienestä reiästä. Neulan avulla on mahdollista säätää suihkun suuntaa ja määrää.



YLLÄPITO

Toisin, kuin polttomoottorit, sähkömoottori ei vaadi säännöllistä huoltoa. Muutama asia on kuitenkin suositeltavaa käydä läpi varmistaaksesi Blimosi toimivuuden.

PUHDISTUS

Puhdista laite ja istuin säännöllisesti kostealla liinalla. Vältä suihkuttamista vettä suoraan laitetta kohti, sillä vesi saattaa tällä tavoin päästä elektroniikkaosien sisään.

PIDEMPAAIKAINEN SÄILYTYS

Jos et käytä Blimoasi pidempään aikaan, tällöin on hyvä huomioida:

- 1) Säilytä laite kuivassa ympäristössä.
- 2) Säilytä laite plusasteissa, muuten akut saattavat jäätyä.
- 3) Ylläpitolataa akut täyteen vähintään kerran kuussa.

Akut voi myös irrottaa laitteesta pidempiaikaiseen säilytykseen sisälämpötilaan. Muistathan myös tällöin ladata akkuja säännöllisesti. Laitteen mukana tulevan laturin voi kiinnittää suoraan akkuihin ja ladata ne irrallaan.

LAMPPUJEN VAIHTAMINEN

Hätävalojen, jarruvalojen ja takavilkkujen vaihtaminen

Takavalojen vaihtoa varten tulee istuin nostaa ensin ulosa Blimosta. Istuimen takana on paneeli, joka on kiinni 2-4 ruuvilla. Avaa nämä ruuvit päästäksesi käsiksi takavilkkuihin sekä jarru- ja hätävaloihin.

Tämän jälkeen voit helposti irrottaa vaihdettavat lamput ja vaihtaa ne uusiin.

Etujalojen ja -vilkkujen vaihtaminen

Etujalojen vaihto tapahtuu kaatamalla ensin ohjaustangon kumoon. Ohjaustangon takana on paneeli, joka on kiinni muutamalla ruuvilla. Paneelin takaa on helppo pääsy valoihin.

Ruuvaa vaihdettavat lamput irti ja vaihda ne uusiin. Jotkin lamput oavt töpselimallisia, joten kaikkia ei tarvitse ruuvata.

SULAKKEIDEN VAIHTAMINEN

Blimo skootterisi on varustettu sulakkeilla, jotka suojaavat elektroniikkaosia ylikuormitukselta.

1. Varasulake - 3A
2. Takavallo - 3A
3. Vasemmat vilkut - 3A
4. Etuvalo - 3A
5. Oikeat vilkut - 3A
6. Laturi - 10A

Laitteessa on myös automaattinen pääsulake (100A). Pääsulake on sijoitettu akkujen väliin.



RENKAAN JA SISÄKUMIN VAIHTAMINEN

Blimo skootterisi on varustettu kestäväillä kumirenkailla ja vaihdettavilla sisäkumeilla. Joskus sisäkumi puhkeaa tai renkaat kuluvat. On hyvin tärkeää, että korjaat nämä uusilla, alkuperäisillä osilla. Jotta saat oikeat osat, otathan yhteyttä Blimo asiakastukeen. Tavallinen polkupyöräliike voi usein hoitaa renkaan tai sisäkumin vaihdon melko huokeaan hintaan, jos tarvitset apua.

HUOM: Älä unohda kiristää pyörämuttereita muutaman käyttökerran jälkeen!

Pyörän irrottaminen

Aseta Blimo esimerkiksi kuljetuslavalle tai vastaavalle, niin että pyörä, jonka rengas tai sisäkumi pitää vaihtaa, on ilmassa. Pyörän keskellä on suojuus, joka on kiinnitetty kahdella pienellä ruuvilla. Avaa ruuvit ja irrota suojuus. Pyörämutteri, joka kiinnittää pyörän akseliin on nyt näkyvillä. Avaa mutteri mieluiten renkasavaimella, joka tulee koko mutterin ympärille. Nyt renkaan saa irrotettua akselistä.

Renkaan ja sisäkumin irrottaminen

- 1) Päästä kaikki ilma ulos sisäkumista. Sisällä ei saa olla painetta, kun rengas irrotetaan.
- 2) Avaa kaikki mutterit vanteen reunasta.
- 3) Vedä vanteen reunoista niin, että vanne jakautuu kahteen osaan.
- 4) Nosta rengas ja sisäkumi pois vanteelta.

Renkaan ja sisäkumin asentaminen

- 1) Ujuta sisäkumi vanteelle sen reunaa pitkin.
- 2) Lisää sisäkumiin hieman ilmaa, jottei se taitu renkaan sisällä.
- 3) Aseta sisäkumi renkaan sisälle. Sisäkumia tulee painaa renkaan sisälle.
- 4) Kiinnitä vanteen puoliskot toisiinsa.
- 5) Ruuvaa vanteen mutterit takaisin.
- 6) Täytä rengas oikeaan paineeseen (3,0 BAR).

PYÖRÄN ASENTAMINEN

Jos olet ajanut epätasaisilla rengaspaineilla tai olet juuri vaihtanut Blimo skootterisi pyörät, saattaa olla hyvä tarkistaa pyöräkulmat. Jos kulmaus on epätasainen, sillä on suuri vaikutus akkukantamaan ja renkaat saattavat kulua epätasaisesti. Optimaalinen kulmaus renkaille on hieman sisäkanttiin.

Säätääksesi kulmausta, vapauta nivelien molemmat ruuvit. Kun mutterit ovat löysällä, säädä itse keskiniveltä kiintoavaimella. Nivelessä on lovi tai viiste, jotta kiintoavaimella saa kunnon otteen. Varmista myös, että ohjaustanko on suorassa ennen mutterien kiristämistä.

RENGASPAINEN

Tarkista, että renkaissa on oikea paine ennen ensimmäistä käyttöönottoa, oikea paine on merkitty renkaiden kylkiin. Jos rengaspaine on liian alhainen, pumpkaa renkaat huoltoasemalla. Jos haluat pumpata renkaita kotona, löydät oikeanlaisen pumpun lähimmästä polkupyöräliikkeestä.

Ota tavaksi tarkistaa rengaspaineet säännöllisesti, noin kerran kuussa. Liian alhainen rengaspaine aiheuttaa huomattavasti lyhyemmän akkukantaman.

VIANETSINTÄ

Jos Blimo skootterissasi ilmenee jokin ongelma, skootteri ilmoittaa siitä vikakoodilla. Tämä tarkoittaa sitä, että skootteri päästää äänimerkkejä ja vilkuttaa valoja, joiden perusteella tiedät, mikä on vialla. Huomioidithan myös, että sinun tulee käynnistää skootteri uudelleen, kun olet suorittanut tarvittavat ongelman ratkomiseen tarvittavat toimenpiteet.

Ongelma	Vika	Ratkaisu
Huoltovalo vilkuttaa kahden välähdyksen sarjoissa.	Akkujen varaustaso on liian alhainen.	Lataa akut.
Huoltovalo vilkuttaa kolmen välähdyksen sarjoissa.	Akkujen varaustaso on liian korkea	Tarkista akkuliitännät.
Huoltovalo vilkuttaa viiden välähdyksen sarjoissa.	Vapaatila on käytössä.	Katso sivulta 3, kuinka vapaatila otetaan pois käytöstä.
Huoltovalo vilkuttaa kuuden välähdyksen sarjoissa.	Kaasukahvaa painetaan liian aikaisin tai se ei ole neutraalissa asennossa.	Sammuta virta. Käynnistä virta uudelleen ja odota hetki ennen kaasukahvan painamista.
Huoltovalo vilkuttaa seitsemän välähdyksen sarjoissa.	Kaasukahvassa on vikaa.	Ota meihin yhteyttä toimenpiteistä.
Huoltovalo vilkuttaa kahdeksan välähdyksen sarjoissa.	Moottoriliitettä on irronnut.	Varmista, että moottorin johdot ovat kunnolla kiinni. Jos ongelma jatkuu, ota meihin yhteyttä.
Huoltovalo vilkuttaa yhdeksän välähdyksen sarjoissa.	Mahdollinen vika sähkölaatikossa.	Ota meihin yhteyttä vian selvittämiseksi sekä toimenpiteistä.
Blimo skootterisi ei lataudu.	Lukuvirhe.	Näet latauksen tilan laturista. Jos laturissa palaa vihreä ja punainen valo, akut on ladattu täyteen.
Blimo skootterisi ei lataudu, mutta skootterilla voi ajaa.	Laitteen pääsulake on palanut tai laturin sulake ei toimi.	Vaihda sulake tai ota meihin yhteyttä vian selvittämiseksi.
Laturi ei toimi.	Laturi ei saa virtaa.	Kokeile laturia toiseen seinäpistokkeeseen. Tarkista laturin sulake.
Blimo skootterisi kulkee hitaasti.	Laitteen hidas vaihde on asetettu päälle.	Paina hidas/nopea vaihtenappulaa.
Blimo skootterisi pysähtyy äkisti kesken ajon.	Akkuliitettä on huonosti.	Tarkista, että akkuliitettä on kiinni kunnolla ja tiukasti. Jos vika jatkuu, ota meihin yhteyttä.
Blimo skootterisi nopeus laskee kesken ajon.	Nopeuden säädin on löysällä. Näin saattaa käydä, jos säädintä käytetään harvoin.	Pysäytä laite ja kierrä nopeussäädintä nopeasta hitaaseen max 25 kertaa. Käynnistä laite uudelleen.
Blimo skootterisi akkukantama on huono per lataus.	Liian vähäinen rengaspaine tai akun lataaminen lopetetaan liian aikaisin.	Lataa akut täyteen ja pumpppaa renkaat. Jos ongelma jatkuu, on aika vaihtaa akut.

YHTEYSTIEDOT

Blimo
 Nordbutiker i Sverige AB
 Gösvägen 28
 76141Norrtälje
 SWEDEN
 Puh: 09 4245 2099
 E-mail: info@blimo.fi
 Org. 556908-9385
 Y-tunnus: 2834405-9

RUNKONUMERO

--	--	--	--	--	--	--

Malli

--